



SPEIKO PROPHYLAXE-PULVER SOFT

mit Minz-/ Zitronengeschmack

Zusammensetzung:

SPEIKO Prophylaxe-Pulver soft enthält: Natriumbicarbonat, Pfefferminzaroma bzw. Zitronenaroma

Anwendungsgebiete:

Zur Entfernung von Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen auf Zahnschmelz.

Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation der Gerätehersteller!

Durch die reduzierte Korngröße der Partikel beim „soft“ gegenüber dem SPEIKO Prophylaxe-Pulver (normale Korngröße) ist eine sanftere und weniger abrasive Reinigung der Zahnoberfläche möglich. Dadurch eignet sich SPEIKO Prophylaxe Pulver Soft für weniger hartnäckige Beläge und somit zur häufigeren Anwendung bei Patienten mit verkürzten Recallintervallen.

Die Hauptkomponente Natriumhydrogencarbonat garantiert pharmakologische Unbedenklichkeit.

Gegenanzeigen:

Freiliegendes Dentin und Schmelzkaries sollen durch das Wasser-Pulver-Luftgemisch nicht bestrahlt werden, da hier mit höheren Abrasionswerten zu rechnen ist.

Ebenfalls sollen Kompomer-, Komposit-, Amalgam- und Goldfüllungen nicht bearbeitet werden, da Aufrauungen zu erwarten sind.

Der Wasser-Luft-Pulver-Strahl darf nicht auf das Zahnfleisch oder sonstige Weichgewebe gerichtet werden, auch ist ein Entfernen von Belägen oder Konkrementen in Zahnfleischtaschen kontraindiziert.

Nebenwirkungen / Wechselwirkungen:

Keine bekannt

Hinweise:

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Bei Raumtemperatur lagern!

Das Medizinprodukt soll nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handelsform:

SPEIKO Prophylaxe-Pulver soft mit Minzgeschmack	Inhalt: 200 g	Bestell-Nr. 1023
SPEIKO Prophylaxe-Pulver soft mit Zitronengeschmack	Inhalt: 200 g	Bestell-Nr. 1024

Stand der Information: September 2009

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Telefon 0251/789040 Telefax 0251/7890422 e-mail: info@speiko.de www.speiko.de

Printed in Germany Imprimé en Allemagne