



## SPEIKOSEPT CHX 2 %-Gel

---

### Zusammensetzung:

Enthält 2 % Chlorhexidindigluconat.

### Anwendungsgebiete:

- Zur Reinigung kontaminierter Wurzelkanalinstrumente während der Wurzelkanalbehandlung
- Nur für den dentalen Gebrauch

### Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Eine ausreichende Menge des Gels in ein geeignetes Gefäß, wie z. B. einen Arbeitsständer für Endofeilen, geben.

Die während der Behandlung verwendeten Instrumente werden dort abgelegt und gleichzeitig durch den Kontakt mit dem Gel gereinigt.

Durch die vorhandene antibakterielle Wirkung des Chlorhexidins gegenüber den meisten unerwünschten Endobakterien und -pilzen wird auch deren Keimzahl stark vermindert. Ein zusätzliches Abspülen ist nicht erforderlich. Die Endo- Instrumente sind während der Behandlung direkt wieder verwendbar.

Nach der Behandlung müssen die verwendeten Instrumente und Behälter, die nicht zum Einmalgebrauch gedacht sind, nach Vorschrift (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation etc.) aufgearbeitet werden.

### Hinweise:

Chlorhexidin-haltige Produkte dürfen nicht mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten gemischt werden, da sich sonst ein schwerlöslicher, rotbrauner Niederschlag bildet.

Dieses Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Gebrauch Spritze wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur lagern.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### Handelsformen:

SPEIKOSEPT CHX 2 %-Gel      Inhalt: 3,0 g      Art.-Nr. 1071

Stand der Information: August 2020

---