



CE 0482

SPEIKO® Universal Flüssigkeit Litho

(vormals Zhanelka)
normalhärtend/schnellhärtend

Zusammensetzung:

Enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen und Zinkionen.

Anwendungsgebiete:

Flüssigkeiten zum Anmischen der folgenden Zahnzement-Pulver:

- SPEIKO® Silikatzement (vormals Zhanelka Silikatzement)
- SPEIKO® Zinkporzellanzement opak (vormals Zhanelka Zinkporzellanzement opak)
- SPEIKO® Spezial-Kupferzement opak (vormals Zhanelka Spezialkupferzement opak)
- SPEIKOLIT® (vormals Zhanelkalit)

Die Gegenanzeigen, Nebenwirkungen/Wechselwirkungen und die Dosierung, Art und Dauer der Anwendung finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der Pulver.

Hinweise:

SPEIKO® Universal Flüssigkeit Litho enthält Phosphorsäure, die Verätzungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Kontakt mit Haut, Schleimhäuten bzw. Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

SPEIKO® Universal Flüssigkeit Litho darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsformen:

SPEIKO® Universal Flüssigkeit Litho normalhärtend

Inhalt: 20 ml

Art.-Nr. 1437

SPEIKO® Universal Flüssigkeit Litho schnellhärtend

Inhalt: 20 ml

Art.-Nr. 1441

Stand der Information: Januar 2017
