



SPEIKO PROPHYLAXE- PULVER

Mit Minz oder Zitronengeschmack

Zusammensetzung:

SPEIKO Prophylaxe - Pulver enthält: Natriumbikarbonat, Minz- oder Zitronenaroma.

Anwendungsgebiete:

Zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen auf Zahnschmelz. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation der Gerätehersteller!

Durch eine optimierte Korngrößenverteilung ermöglicht das Pulver eine effektive Belagentfernung bei minimaler Abrasion.

Hauptkomponente Natriumhydrogencarbonat garantiert pharmakologische Unbedenklichkeit.

Gegenanzeigen:

Freiliegendes Dentin und Schmelzkaries sollen durch das Wasser-Pulver-Luftgemisch nicht bestrahlt werden, da hier mit höheren Abrasionswerten zu rechnen ist.

Ebenfalls sollen Kompomer-, Komposit-, Amalgam- und Goldfüllungen nicht bearbeitet werden, da Aufrauungen zu erwarten sind.

Der Wasser-Luft-Pulver-Strahl darf nicht auf das Zahnfleisch oder sonstige Weichgewebe gerichtet werden, auch ist ein Entfernen von Belägen oder Konkrementen in Zahnfleischtaschen kontraindiziert.

Nebenwirkungen / Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Hinweise:

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Nicht über 25°C lagern.

Medizinprodukte sollen nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Handelsform:

SPEIKO Prophylaxe - Pulver mit Minzgeschmack

Inhalt: 1000 g Artikel-Nr.: 1076

SPEIKO Prophylaxe - Pulver mit Zitronengeschmack

Inhalt: 1000 g Artikel-Nr.: 1079

Stand der Information: August 2015

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Telefon +49 (0)251/789040 Telefax +49 (0)251/7890422 e-mail: info@speiko.de www.speiko.de

Printed in Germany Imprimé en Allemagne