



SPEIKO Easy Endo Tips

Zusammensetzung:

Enthält Polypropylen, transparent.

Anwendungsgebiete:

- Spülung von Wurzelkanälen
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Den Easy Endo Tip mit dem Gewinde an den Anschluss einer zuvor gefüllten Luer- oder Luer-Lock-Spritze anschließen.

Der Easy Endo Tip wird durch festes Drehen bei einer Luer-Lock-Verbindung oder festes Aufdrücken bei einer Luer-Verbindung befestigt.

Durch kurzes, kräftiges Ziehen von der Festigkeit der Verbindung überzeugen.

Spritze und Easy Endo Tip für die Wurzelkanalspülung verwenden.

Nach Gebrauch den Easy Endo Tip von der Spritze trennen und gemäß den Entsorgungsvorschriften entsorgen.

Kompatible Flüssigkeiten sind Hypochlorit-SPEIKO 5,25 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 %, Hypochlorit-SPEIKO 1 %, SPEIKO EDTA-Lösung, SPEIKO Zitronensäurelösung 10 %.

Die Entnahme der kompatiblen Flüssigkeiten kann mit dem SPEIKO Easy Quick Entnahmesystem erfolgen.

Bei der Anwendung des Easy Endo Tips zur Wurzelkanalspülung ist sicherzustellen, dass sich die Kanüle frei bewegen kann, um einen konstanten Rückfluss der Spülflüssigkeit zu gewährleisten.

Hinweise:

SPEIKO Easy Endo Tips sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.

Das Produkt ist gebrauchsfertig hergestellt.

Handelsformen:

SPEIKO Easy Endo Tips normal

Inhalt: 30 Stück

Art.-Nr. 1036

SPEIKO Easy Endo Tips lang

Inhalt: 30 Stück

Art.-Nr. 1037

Stand der Information: Februar 2021