



## Hypochlorit-SPEIKO 1 %

CE 0482

### Zusammensetzung:

Enthält 1 % Natriumhypochlorit, gereinigtes Wasser.

### Anwendungsgebiete:

- Hypochlorit-SPEIKO 1 % zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung gespült werden
- Nur für den dentalen Gebrauch

### Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegen Natriumhypochlorit oder Chlor
- Bei durchgängiger Wurzelspitze (offenem Foramen apicale)

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Auf lebendes Gewebe wirkt Natriumhypochlorit reizend oder auch schädigend. Bei unsachgemäßer Anwendung (z. B. Überpressen der Lösung über den Apex hinaus) kann es durch die gewebsauflösende Wirkung von Natriumhypochlorit zu Schädigungen von lebendem Gewebe kommen.

Bei Kontakt von Natriumhypochlorit mit Chlorhexidin kann es zu orangebraunen Ausfällungen kommen, die das Wurzelkanalsystem verunreinigen. Daher wird bei der Anwendung beider Mittel eine Zwischenspülung empfohlen.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die benötigte Menge an Hypochlorit-SPEIKO 1 % richtet sich nach den lokalen Gegebenheiten.

Während der Wurzelkanalbehandlung wird Hypochlorit-SPEIKO 1 % mit geeigneten Instrumenten und in geeigneter Technik (langsame Applikation ohne Druck, Absaugung der Spüllösung, Schutz von Zahnfleisch und Mundschleimhaut durch Verwendung von Kofferdam) zur spülenden Reinigung des Wurzelkanals benutzt.

Die Entnahme von Hypochlorit-SPEIKO 1 % kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy Quick-Entnahmesystem erfolgen. Zur Applizierung liegen jeder Packung Hypochlorit-SPEIKO 1 % zudem zwei SPEIKO Easy Endo Tips (normal und lang) bei. Gebrauchsanweisung dazu auf [www.speiko.de](http://www.speiko.de) unter SPEIKO Easy Endo Tips.

### Hinweise:

Bei Raumtemperatur lagern und die Flasche fest verschlossen halten.

Nach Anbruch der Flasche beträgt die Dauer der Haltbarkeit 6 Monate.

Hypochlorit-SPEIKO 1 % darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Der Kontakt von Hypochlorit-SPEIKO 1 % mit Haut, Schleimhaut und Augen ist zu vermeiden.

### Handelsformen:

Flüssigkeit	Inhalt: 30 ml	Art.-Nr. 1025	SPEIKO Easy Quick 30 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1039
Flüssigkeit	Inhalt: 100 ml	Art.-Nr. 1026	SPEIKO Easy Quick 100 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1040
Flüssigkeit	Inhalt: 250 ml	Art.-Nr. 1027	SPEIKO Easy Quick 250 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1038
Flüssigkeit	Inhalt: 500 ml	Art.-Nr. 1028			

SPEIKO Easy Endo Tips normal      Inhalt: 30 Stück      Art.-Nr. 1036

SPEIKO Easy Endo Tips lang      Inhalt: 30 Stück      Art.-Nr. 1037

Stand der Information: März 2025