



CE 0482

SPEIKO Universal Flüssigkeit Litho

(vormals Zhanelka)
normalhärtend/schnellhärtend

Zusammensetzung:

Enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen und Zinkionen.

Anwendungsgebiete:

SPEIKO Universal-Flüssigkeit Litho normalhärtend zum Anmischen der folgenden Zahnzement-Pulver:

– SPEIKO Zinkporzellanzement opak (vormals Zhanelka Zinkporzellanzement opak)

SPEIKO Universal-Flüssigkeit Litho schnellhärtend zum Anmischen der folgenden Zahnzement-Pulver:

– SPEIKO Silikatzement (vormals Zhanelka Silikatzement)

– SPEIKO Zinkporzellanzement opak (vormals Zhanelka Zinkporzellanzement opak)

– SPEIKO Spezial-Kupferzement opak (vormals Zhanelka Spezialkupferzement opak)

– SPEIKOLIT (vormals Zhanelkalit)

Gegenanzeigen:

– Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

– Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Zemente unter dem Punkt Gegenanzeigen

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Zemente unter dem Punkt Nebenwirkungen/Wechselwirkungen

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die Dosierung, Art und Dauer der Anwendung ist abhängig von dem verwendeten Zement. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Zemente unter dem Punkt Dosierung, Art und Dauer der Anwendung.

Hinweise:

SPEIKO Universal Flüssigkeit Litho normal- und schnellhärtend enthält Phosphorsäure, die Verätzungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Kontakt mit Haut, Schleimhäuten bzw. Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

SPEIKO Universal Flüssigkeit Litho normal- und schnellhärtend darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsformen:

SPEIKO Universal Flüssigkeit Litho normalhärtend

Inhalt: 20 ml

Art.-Nr. 1437

SPEIKO Universal Flüssigkeit Litho schnellhärtend

Inhalt: 20 ml

Art.-Nr. 1441

Stand der Information: Juli 2025