



## SPEIKOCOPAL

CE 0482

### Zusammensetzung:

Enthält 12,5% Copalharz, Diethylether, Ethanol.

### Anwendungsgebiete:

- Zur Auskleidung bei flachen Kavitäten
- Als Schutzlack für Silikat- und Siliko-Phosphatzementfüllungen
- Geeignet bei Amalgamfüllungen
- Nur für den dentalen Gebrauch

### Gegenanzeigen:

- Bei Verwendung von Kunststofffüllungen
- Bei Verwendung von Glasionomer- und Polycarboxylatzementen
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Nach Reinigung und Trocknung der Kavität wird der Lack in dünner Schicht aufgetragen und mittels sanftem Luftstrom getrocknet.

Falls eine zweite Lage des Kavitätenlacks aufgetragen werden soll, hat die Applikation erst nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht zu erfolgen.

Vor Applikation des Füllungsmaterials ist der Kavitätenrand vom Kavitätenlack zu befreien.

### Hinweise:

Diethylether ist eine leicht flüchtige, sehr entzündliche Flüssigkeit. Aufbewahrung in der braunen, lichtundurchlässigen Flasche.

SPEIKOCOPAL darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

### Handelsform:

SPEIKOCOPAL

Inhalt: 20 ml

Art.-Nr. 1049