



# CE SPEIKOPLAQUE DUO Pellets

## Zusammensetzung:

Enthält Patentblau (E131), Phloxin B, Demineralisiertes Wasser, Pellets.

## Anwendungsgebiete:

- Zur Visualisierung von Zahnbelag (Plaque) auf Zahnoberflächen
- Ältere Beläge färben sich blau, jüngere Beläge färben sich rot

## Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe

## Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

## Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Entnehmen Sie mit einer Pinzette ein mit SPEIKOPLAQUE DUO getränktes Wattepellet und tragen die Flüssigkeit, die sich in dem Pellet befindet, auf die zu prüfenden Zahnoberflächen auf.

Vorhandener Belag wird durch Rot- und Blaufärbung sofort sichtbar.

Entfernung der Färbung durch Spülen mit Wasser und Putzen der Zähne.

## Hinweise:

SPEIKOPLAQUE DUO Pellets darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung bei Raumtemperatur.

## Handelsform:

SPEIKOPLAQUE DUO Pellets

Inhalt: 100 Stück

Art.-Nr. 1074

Stand der Information: März 2025