



SPEIKOSEPT CHX 2 %

Zusammensetzung:

Enthält 2 % Chlorhexidindigluconat.

Anwendungsgebiete:

- Zur Reinigung kontaminierter Wurzelkanalinstrumente während der Wurzelkanalbehandlung
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Eine ausreichende Menge der Lösung in ein geeignetes Gefäß, wie z.B. einen Arbeitsständer für Endofeilen, geben.

Die während der Behandlung verwendeten Instrumente werden dort abgelegt und gleichzeitig durch den Kontakt mit der Lösung gereinigt.

Durch die vorhandene antibakterielle Wirkung des Chlorhexidins gegenüber den meisten unerwünschten Endobakterien und -pilzen wird auch deren Keimzahl stark vermindert.

Nach der Behandlung müssen die verwendeten Instrumente und Behälter, die nicht zum Einmalgebrauch gedacht sind, nach Vorschrift (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation etc.) aufgearbeitet werden.

Hinweise:

Chlorhexidin-haltige Produkte dürfen nicht mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten gemischt werden, da sich sonst ein schwerlöslicher, rotbrauner Niederschlag bildet.

Dieses Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Gebrauch Flasche wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur lagern.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Handelsformen:

SPEIKOSEPT CHX 2 %	Inhalt: 30 ml	Art.-Nr. 1056
SPEIKOSEPT CHX 2 %	Inhalt: 100 ml	Art.-Nr. 1070