



CE 0482

Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste normalhärtend / schnellhärtend

Zusammensetzung:

Pulver enthält Zinkoxid, Zinkacetat, Kolophonium, Talkum, Siliciumdioxid.
Flüssigkeit enthält Nelkenöl, in der ZOE-Spezialpaste schnellhärtend zusätzlich Olivenöl.

Anwendungsgebiete:

- Provisorische Versorgung von Kavitäten, besonders bei Caries profunda-Behandlungen
- Provisorische Verschlüsse bei endodontischen Behandlungen
- Als thermoisolierende Unterfüllung bei Zement- und Metallfüllungen
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber Kolophonium und Nelkenöl (Eugenol)
- Bei der Verwendung von Komposit- und Kompomerfüllungen
- Bei eröffneter Pulpa oder pulpanahen Bereichen

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die Paste wird angemischt, wobei 1 Tropfen Flüssigkeit etwa die vierfache Menge Pulver bindet. Unmittelbar nach dem Anmischen wird die Paste innerhalb weniger Sekunden weicher und man kann noch etwas Pulver zumischen. Es soll zu einer möglichst festen Konsistenz angemischt werden.

Die Paste kann leicht in die trockene Kavität appliziert und mit einem mit Wasser angefeuchteten Wattetupfer abgedrückt werden.

Gegebenenfalls kann noch Paste aufgetragen werden. Unter Speichel- und Wassereinwirkung beginnt die Aushärtung kurze Zeit später. Die Endhärte wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

Hinweise:

Die gewünschte Endhärte kann durch Variation des Mischverhältnisses beeinflusst werden. Bei mehr Flüssigkeit erhält man eine hohe Endhärte, bei mehr Pulver eine geringere Endhärte.

Bis zum Erreichen der gewünschten Endhärte sollte der Patient eine stärkere Kaubelastung vermeiden. Nach 24 Stunden ist es belastungsfähig.

Das Pulver ist nach Gebrauch sofort wieder zu verschließen. Pulver trocken lagern, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsformen:

ZOE Spezialpaste normalhärtend Pulver	Inhalt: 40 g	Art.-Nr. 1082
ZOE Spezialpaste normalhärtend Flüssigkeit	Inhalt: 10 ml	Art.-Nr. 1087
ZOE Spezialpaste normalhärtend Set	Inhalt: 40 g/10 ml	Art.-Nr. 1086
ZOE Spezialpaste schnellhärtend Pulver	Inhalt: 40 g	Art.-Nr. 1093
ZOE Spezialpaste schnellhärtend Flüssigkeit	Inhalt: 10 ml	Art.-Nr. 1098
ZOE Spezialpaste schnellhärtend Set	Inhalt: 40 g/10 ml	Art.-Nr. 1097

Zubehör: Dosierlöffel

Stand der Information: Februar 2021