



CE 0482

## SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10%

### Zusammensetzung:

Enthält 10% Zitronensäure, gereinigtes Wasser.

### Anwendungsgebiete:

- Auffindung von Wurzelkanaleingängen
- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Entfernung der Schmierschicht (smear layer)
- Entfernung von Kalkansammlungen auf empfindlichen Instrumenten
- Nur für den dentalen Gebrauch

### Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber Zitronensäure
- Bei weit offenem Foramen apicale

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt. Wenn das Material über den Apex gelangt, ist mit Reizungen des peri-apikalen Gewebes zu rechnen.

Zu lange Einwirkzeiten von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% führen zur Erweichung des Wurzelkollagens.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

#### Auffinden von Wurzelkanaleingängen:

Bei schwer auffindbaren Wurzelkanaleingängen kann SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% in die Kavität eingetropfelt werden. Nach wenigen Minuten werden die Wurzelkanaleingänge sichtbar.

#### Erweiterung von Wurzelkanälen:

Zur Aufbereitung und Erweiterung von Wurzelkanälen wird die Lösung mittels Pipette oder geeigneter Spülkanüle in den Wurzelkanal appliziert. Dieses sollte während der gesamten Wurzelkanalaufbereitung wiederholt durchgeführt werden.

#### Entfernung der Schmierschicht (smear layer):

Zur Entfernung der Schmierschicht (smear layer) ist im aufbereiteten Wurzelkanal eine großvolumige Spülung mit SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% notwendig. Um Pulpenreste, nekrotisches Gewebe und Dentinrückstände zu beseitigen, kann abwechselnd mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% gespült werden.

Nach Beendigung der Wurzelkanalaufbereitung sollte SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% vollständig durch Spülen mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% oder einer CHX-Lösung entfernt werden. Die Trocknung des Wurzelkanals sollte dann mit sterilen Papierspitzen erfolgen.

Die Entnahme von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy Quick-Entnahmesystem erfolgen. Zur Applizierung liegen jeder Packung SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% zudem zwei SPEIKO Easy Endo Tips (normal und lang) bei. Gebrauchsanweisung dazu auf [www.speiko.de](http://www.speiko.de) unter SPEIKO Easy Endo Tips.

### Hinweise:

SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Der Kontakt von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% mit Haut, Schleimhaut und Augen ist zu vermeiden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

### Handelsformen:

Flüssigkeit	Inhalt: 30 ml	Art.-Nr. 1465	SPEIKO Easy Quick 30 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1039
Flüssigkeit	Inhalt: 100 ml	Art.-Nr. 1466	SPEIKO Easy Quick 100 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1040
Flüssigkeit	Inhalt: 250 ml	Art.-Nr. 1467	SPEIKO Easy Quick 250 ml	Inhalt: 1 Stück	Art.-Nr. 1038
Flüssigkeit	Inhalt: 500 ml	Art.-Nr. 1468			

SPEIKO Easy Endo Tips normal    Inhalt: 30 Stück    Art.-Nr. 1036

SPEIKO Easy Endo Tips lang    Inhalt: 30 Stück    Art.-Nr. 1037

Stand der Information: März 2025