

Composition :

Contient de l'hydroxyde de calcium et du sulfate de baryum en suspension aqueuse, du chlorure de calcium, du chlorure de potassium, du chlorure de sodium, du bicarbonate de sodium, de l'eau purifiée.

Domaines d'applications :

- Restauration de la dentine sans carie proche de la pulpe
- Implant temporaire dans le canal radiculaire
- Traitement en profondeur des caries ou coiffage pulpaire indirect
- Réserve à une utilisation dentaire

Contre-indications :

- En cas d'exposition de la pulpe dans la dentine cariée
- En cas de pulpe modifiée par l'inflammation
- En cas d'hypersensibilité vis-à-vis de certains ingrédients

Effets secondaires/effets combinés :

Aucun connu en cas d'utilisation conforme.

Dosage, type et durée d'utilisation :

Coiffage pulpaire (indirect) :

De petites quantités de Calasept sont placées sur un bloc de mélange et appliquées à partir de là avec un instrument sur la dentine près de la pulpe. Après l'application, la pâte doit être épaissie à l'aide de matières absorbant l'eau (pellets de coton ou bouts de papier). Le tout est ensuite recouvert de façon étanche à l'aide d'un matériau de plombage.

Implant temporaire dans le canal radiculaire :

Nettoyer le canal radiculaire avec Hypochlorite-SPEIKO 1% ou Hypochlorite-SPEIKO 3% ou Hypochlorite-SPEIKO 5.25% et le sécher à l'aide de bout de papier stériles. En tant que matériau de plombage temporaire pour canaux radiculaires, CALASEPT-SPEIKO peut, à l'aide d'un lentulo par ex., être directement appliqué dans le canal préalablement préparé. Appliquer la pâte dans le canal radiculaire est également possible à l'aide des canules jetables fournies. Si nécessaire, l'application peut être répétée. CALASEPT-SPEIKO doit être retirée avant le plombage définitif de la racine.

Traitement en profondeur des caries :

Avant d'appliquer une fine couche de CALASEPT-SPEIKO, nettoyer la cavité et la laisser sécher. Si une couche plus épaisse est nécessaire, appliquer le produit par couches. Sécher chaque couche avec un jet d'air doux. Pour terminer, poser le sous-plombage et le plombage.

Remarques :

Utilisation des bonnes canules : Afin d'éviter un durcissement du matériau, la canule jetable doit être placée dans les bouchons en caoutchouc fournis et la canule courbée fermée à l'aide du fil de traction.

Utilisation de la seringue à carpule appropriée : Nous recommandons l'utilisation d'une seringue à carpule non auto-aspirante. La seringue utilisée pour CALASEPT-SPEIKO doit avoir un piston bien centré ne pouvant pas se déplacer sur le côté. Les seringues avec crochet d'aspiration ou piston en forme de V ne peuvent pas être utilisées.

CALASEPT-SPEIKO ne peut plus être utilisé une fois sa date de péremption expirée.

Stockage à température ambiante.

Des rapports de synthèse sur la sécurité et les performances cliniques du dispositif médical sont disponibles dans la base de données européenne des dispositifs médicaux (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Présentation :

CALASEPT-SPEIKO, 2 x 2,5 g, 3 canules jetables
25 canules jetables

n° d'art. 1005

n° d'art. 1006

Mise à jour des informations : Septembre 2026