



CE 0482

CALASEPT-SPEIKO met röntgencontrast

Samenstelling:

Bevat calciumhydroxide en bariumsulfaat in waterige suspensie, calciumchloride, kaliumchloride, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, gezuiverd water.

Toepassingsgebieden:

- Verzorging van cariësvrij dentine in de buurt van de pulpa
- Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal
- Cariës-profunda behandeling
- Alleen voor dentaal gebruik

Contra-indicaties:

- Voor pulpa-opening in carieus dentine
- In het geval van inflammatoire pulpaveranderingen
- Bij overgevoeligheid voor actieve bestanddelen

Bijwerkingen/interacties:

Bij doelmatig gebruik geen bijwerkingen/interacties bekend.

Dosering, type en duur van de toepassing:

Pulpa-aftopping (indirect):

Er worden kleine hoeveelheden CALASEPT-SPEIKO op een mengblok gedaan en van daaruit met een instrument aangebracht op het dentine in de buurt van de pulpa. Na het aanbrengen moet de pasta worden gecompriëerd met behulp van water-absorberende materialen zoals katoenkorrels of papieren tips. Daarna strak afdekken met een opvulmateriaal.

Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal:

Reinig het wortelkanaal met hypochloriet SPEIKO 1%, hypochloriet SPEIKO 3% of hypochloriet SPEIKO 5,25% en droog het met steriele papieren tips. Als tijdelijk vulmateriaal voor wortelkanalen kan CALASEPT-SPEIKO rechtstreeks in het geprepareerde kanaal worden geplaatst, bijvoorbeeld met behulp van een lentulo. Het aanbrengen van de pasta in het wortelkanaal is ook mogelijk met behulp van de bijgeleverde wegwerpanules. Indien nodig, kan de toepassing worden herhaald. De CALASEPT-SPEIKO moet worden verwijderd vóór de definitieve wortelkanaalvulling.

Cariës profunda-behandeling:

Alvorens CALASEPT-SPEIKO in een dunne laag aan te brengen, de caviteit reinigen en drogen. Indien een dikkere laag gewenst is, in lagen aanbrengen. Droog elke laag kort met een zachte luchtstroom. Vervolgens de ondervulling en de vulling aanbrengen.

Aanwijzingen:

Gebruik van de juiste cannules: Om te voorkomen dat het materiaal hard wordt, moet de wegwerpanule in de bijgeleverde rubber stop worden gestoken.

Gebruik van de juiste carpule-spuit: Wij bevelen het gebruik van een niet-zelf-aspirerende carpule-spuit aan. De spuit die voor CALASEPT-SPEIKO wordt gebruikt, moet een goed gecentreerde zuiger hebben die niet zijwaarts kan bewegen. Spuiten met aspirerende haken of V-vormige zuigers mogen niet worden gebruikt.

CALASEPT-SPEIKO mag niet worden gebruikt na de vervaldatum.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Samenvattende rapporten over de veiligheid en klinische prestaties van het medisch hulpmiddel zijn beschikbaar in de Europese database voor medische hulpmiddelen (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Handelsvormen:

2 cilindrische ampullen á 2,5 g pasta 3 wegwerpanules

art.-nr. 1005

25 Calasept wegwerpanules

art.-nr. 1006

Versie: September 2026