



CALASEPT-SPEIKO med røntgenkontrastmiddel



Sammensetning:

Inneholder kalsiumhydroksid og bariumsulfat i vandig suspensjon, kalsiumklorid, kaliumklorid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, renset vann.

Bruksområder:

- Behandling av kariesfri dentin nær pulpa
- Midlertidig innlegg i rotkanalen
- Behandling av caries profunda
- Kun for dental bruk

Kontraindikasjoner:

- Ved åpning av pulpa i kariesangrepet dentin
- Ved inflammatorisk forandring av pulpa
- Ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene

Bivirkninger/interaksjoner:

Ved forskriftsmessig bruk ingen kjente.

Dosering, type og varighet av anvendelsen:

Pulpaoverkapping (indirekte):

Små mengder CALASEPT-SPEIKO påføres en blandeblokk og påføres derfra med et instrument på dentinet nær pulpa. Etter påføring bør pastaen komprimeres med vannabsorberende materialer, som bomullspelletts eller papirspisser. Deretter dekkes det tett med et underfyllingsmateriale.

Midlertidig innlegg i rotkanalen:

Rengjør rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25% og tørk med sterile papirspisser. CALASEPT-SPEIKO kan brukes som midlertidig fyllingsmateriale for rotkanaler ved hjelp av f.eks. en lentulo direkte i den preparerte kanalen. Pastaen kan også påføres i rotkanalen ved hjelp av de medfølgende engangskanylene. Om nødvendig kan påføringen gjentas. CALASEPT-SPEIKO bør fjernes før den endelige rotfyllingen.

Behandling av caries profunda:

Før CALASEPT-SPEIKO påføres i et tynt lag, må kaviteten rengjøres og tørkes. Hvis et tykkere lag er ønskelig, påføres det lagvis. Hvert lag tørkes kort med en mild luftstrøm. Deretter legges underfyllingen og fyllingen.

Merknader:

Bruk av riktige kanyler: For å forhindre at materialet herder, må engangskanylen stikkes inn i den medfølgende gummiprop-pen.

Bruk av riktig karpylesprøyte: Vi anbefaler bruk av en ikke-selvaspirerende karpylesprøyte. Sprøyten som brukes til CALASEPT-SPEIKO må ha en godt sentrert stempel som ikke kan beveges sideveis. Sprøyter med aspirasjonskrok eller V-formet stempel må ikke brukes.

CALASEPT-SPEIKO skal ikke brukes etter utløpsdato.

Oppbevares ved romtemperatur.

Sammendragsrapporter om sikkerhet og klinisk ytelse for det medisinske utstyret er tilgjengelige i den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Handelsformer:

2 sylind rampuller à 2,5 g pasta, 3 engangskanyler	Art.-nr. 1005
25 Calasept-engangskanyler	Art.-nr. 1006

Informasjon per: September 2026