



SPEIKOCAL
avec contraste radiographique

CE 0482

Composition :

Contient de l'hydroxyde de calcium et du sulfate de baryum en suspension aqueuse, du chlorure de calcium, du chlorure de potassium, du chlorure de sodium, de l'eau purifiée.

Domaines d'application :

- Restauration de la dentine sans carie proche de la pulpe
- Implant temporaire dans le canal radiculaire
- Traitement des caries profondes
- Réservé à une utilisation dentaire

Contre-indications :

- En cas d'exposition de la pulpe dans la dentine cariée
- En cas de pulpe modifiée par l'inflammation
- En cas d'hypersensibilité vis-à-vis de certains ingrédients

Effets secondaires/effets combinés :

Aucun connu en cas d'utilisation conforme.

Dosage, type et durée d'utilisation :

Coiffage pulpaire (indirect) :

Placer de petites quantités de pâte sur un godet de mélange et de là, appliquer à l'aide d'un instrument sur la dentine proche de la pulpe. Après l'application, la pâte doit être épaissie à l'aide de matières absorbant l'eau (pellets de coton ou bouts de papier. Le tout est ensuite recouvert de façon étanche à l'aide d'un matériau de plombage.

Implant temporaire dans le canal radiculaire :

Nettoyer le canal radiculaire avec Hypochlorite-SPEIKO 1% ou Hypochlorite-SPEIKO 3% ou Hypochlorite-SPEIKO 5.25% et le sécher à l'aide de bout de papier stériles. En tant que matériau de plombage temporaire pour canaux radiculaires, SPEIKOCAL peut, à l'aide d'un lentulo par ex., être directement appliqué dans le canal préalablement préparé. Appliquer la pâte dans le canal radiculaire est également possible à l'aide des canules jetables fournies. Si nécessaire, l'application peut être répétée. La pâte d'hydroxyde de calcium doit être retirée avant le plombage définitif de la racine.

Traitement en profondeur des caries :

Avant d'appliquer une fine couche de SPEIKOCAL, nettoyer la cavité et la laisser sécher. Si une couche plus épaisse est nécessaire, appliquer le produit par couches. Sécher chaque couche avec un jet d'air doux. Pour terminer, poser le sous-plombage et le plombage.

Remarques :

Pour éviter un durcissement du matériau, il faut impérativement revisser le capuchon de protection sur la seringue après chaque utilisation.

SPEIKOCAL ne peut plus être utilisé une fois sa date de péremption expirée.

Stockage à température ambiante.

Des rapports de synthèse sur la sécurité et les performances cliniques du dispositif médical sont disponibles dans la base de données européenne des dispositifs médicaux (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Présentation :

SPEIKOCAL Contenu : 4,5 g n° d'art. 1055

Accessoires : 3 canules jetables

Mise à jour des informations : Septembre 2026