



CE 0482

SPEIKOCAL med røntgenkontrast

Sammensetning:

Inneholder kalsiumhydroksid og bariumsulfat i vandig suspensjon, kalsiumklorid, kaliumklorid, natriumklorid, renset vann.

Bruksområder:

- Behandling av kariesfritt dentin nær pulpa
- Midlertidig innsetting i rotkanalen
- Behandling av caries profunda
- Kun til dental bruk

Kontraindikasjoner:

- For åpning av pulpa i kariøst dentin
- Ved betennelsesforandringer i pulpa
- Ved overfølsomhet overfor et av innholdsstoffene

Bivirkninger/interaksjoner:

Ingen kjente ved forskriftsmessig bruk.

Dosering, type og varighet av anvendelsen:

Pulpaoverkapping (indirekte):

Små mengder pasta legges på en blandeblokk og påføres derfra med et instrument på dentinet i nærheten av pulpa. Etter påføring fortettes pastaen ved hjelp av vannabsorberende materialer (bomullspelletts eller papirspisser). Deretter dekkes den tett med et underfyllingsmateriale.

Midlertidig innsetting i rotkanalen:

Rengjør rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25% og tørk med sterile papirspisser. SPEIKOCAL kan brukes som midlertidig fyllingsmateriale i rotkanaler ved hjelp av en lentulonål eller de medfølgende engangskanylene. Om nødvendig kan appliseringen gjentas. Kalsiumhydroksidpastaen skal fjernes før den endelige rotfyllingen.

Behandling av caries profunda:

Rengjør og tørk kaviteten før du påfører et tynt lag SPEIKOCAL. Hvis det er behov for et tykkere lag, påføres materialet lagvis. Tørk hvert lag kort med en svak luftstrøm. Legg deretter på underfylling og fylling.

Merknader:

For å forhindre at materialet stivner må beskyttelseshetten skrues tilbake på sprøyten etter bruk.

SPEIKOCAL skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

Oppbevares ved romtemperatur.

Sammendragsrapporter om sikkerhet og klinisk ytelse for det medisinske utstyret er tilgjengelige i den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Handelsform:

Pastasprøyte med 4,5 g og 3 engangskanyler

Art.-nr. 1055

Informasjon per: September 2026