



CE 0482

SPEIKOCAL pulver med røntgenkontrast

Sammensetning:

Inneholder kalsiumhydroksid, bariumsulfat.

Bruksområder:

- Behandling av kariesfritt dentin nær pulpa
- Midlertidig innsetting i rotkanalen
- Behandling av caries profunda
- Kun til dental bruk

Kontraindikasjoner:

- For åpning av pulpa i kariøst dentin
- Ved betennelsesforandringer i pulpa
- Ved overfølsomhet overfor et av innholdsstoffene

Bivirkninger/interaksjoner:

Ingen kjente ved forskriftsmessig bruk.

Dosering, type og varighet av anvendelsen:

Bland SPEIKOCAL pulveret med destillert vann til en pasta. Hell vann på blandeblokken, tilsett pulveret med en spatel og bearbeid til en homogen pasta. Konsistensen kan bestemmes ved å tilsette vann etter behov.

Pulpaoverkapping (indirekte):

Påfør pastaen som tilberedes av SPEIKOCAL pulveret med et instrument på dentinet i nærheten av pulpa. Etter påføring komprimeres pastaen som er fremstilt av SPEIKOCAL pulveret, ved hjelp av vannabsorberende materialer (bomullspelletts eller papirspisser). Deretter dekkes den tett med et underfyllingsmateriale.

Midlertidig innsetting i rotkanalen:

Rengjør rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25% og tørk med sterile papirspisser. Som midlertidig fyllingsmateriale for rotkanaler kan pastaen laget av SPEIKOCAL pulver påføres i rotkanalen ved hjelp av en lentulonål. Om nødvendig kan appliseringen gjentas. Kalsiumhydroksidpastaen skal fjernes før den endelige rotfyllingen.

Behandling av caries profunda:

Rengjør og tørk kaviteten før du påfører et tynt lag med pastaen som er laget av SPEIKOCAL pulver. Hvis det er behov for et tykkere lag, påføres materialet lagvis. Tørk hvert lag kort med en svak luftstrøm. Legg deretter på underfylling og fylling.

Merknader:

SPEIKOCAL pulver skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

Oppbevares ved romtemperatur.

Sammendragsrapporter om sikkerhet og klinisk ytelse for det medisinske utstyret er tilgjengelige i den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Handelsform:

SPEIKOCAL pulver Innhold: 15 g Art.-nr. 1050

Tilbehør: Doseringsskje for pulver

Informasjon per: September 2026