



CE 0482

SPEIKOCAL pulver med röntgenkontrast

Sammansättning:

Innehåller kalciumhydroxid, bariumsulfat.

Användning:

- Behandling av kariesfritt dentin nära pulpan
- Tillfälligt inlägg i rotkanalen
- Caries profunda-behandling
- Endast för dental användning

Kontraindikationer:

- Öppning av pulpan i kariöst dentin
- Inflammerad pulpa
- Överkänslighet mot något av innehållsämnen

Biverkningar/interaktioner:

Inga kända vid användning för avsett ändamål.

Användningens dosering, sätt och varaktighet:

Blanda SPEIKOCAL pulvret med destillerat vatten till en pasta. Detta gör du genom att hålla vatten i blandningsblocket, tillsätta pulvret med en spatel och bearbeta till en jämn pasta. Du kan själv bestämma konsistensen genom att tillsätta vatten efter behov.

Pulpaöverkappning (indirekt):

Använd ett instrument och applicera pastan av SPEIKOCAL pulver på dentinet nära pulpan. Efter applicering ska pastan av SPEIKOCAL pulver komprimeras med vattenabsorberande material (bomullspellets eller pappersspetsar). Täck sedan över ordentligt med basmaterial.

Tillfälligt inlägg i rotkanalen:

Rengör rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 % eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25 % och torka med sterila pappersspetsar. Som tillfälligt fyllnadsmaterial för rotkanaler kan pastan som framställts av SPEIKOCAL pulver appliceras på rotkanalen med hjälp av en lentulonål. Upprepa processen vid behov. Före permanent rotfyllning ska kalciumhydroxid-pastan avlägsnas.

Caries profunda-behandling:

Rengör och torka kaviteten innan du applicerar ett tunt lager pasta av SPEIKOCAL pulver. Om ett tjockare lager önskas, ska detta appliceras i flera skikt. Torka varje lager en kort stund med ett mjukt luftflöde. Lagg sedan basmaterialet och fyllningen.

Information:

SPEIKOCAL pulver får inte användas efter utgångsdatumet.

Förvaring i rumstemperatur.

Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för den medicintekniska produkten finns tillgängliga i den europeiska databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Produktpresentation:

SPEIKOCAL pulver Innehåll: 15 g art.nr 1050

Tillbehör: Doseringsmått för pulver

Senast uppdaterat: September 2026